

おねしょモニター

Wet-Detective™

ウェット・ティテクティブ

夜尿や遺尿にお悩みの方へ

- ◆ センサー内蔵の敷マットが尿漏れを感知し、アラーム(音・光)でお知らせします。
- ◆ マットセンサーの裏面は防水生地のため、敷布団を濡らしません。
- ◆ アラームの音量は4段階で、音量を変えると音質も変わります。
- ◆ マットセンサーは洗濯機で洗えます。
- ◆ 電源は単三・アルカリ乾電池・2本です。




音量を設定できます(レベル 0~3)。

濡れを感知すると、レスポンド・スイッチを押すまで音が出ます。

レスポンド・スイッチ「RESPOND」
濡れを感知している間、赤ランプが点滅し続けます。



マットセンサー

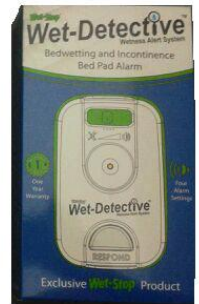

アラーム本体



【用途】

本品は、夜尿や遺尿による多量な尿漏れを布団上で感知し、敷き布団を濡らすことなくアラームでお知らせする装置です。夜尿症の改善トレーニングを目的とする場合は、パジャマに装着するタイプの「ウェットストップ3」の使用をお奨めします。

【取扱および操作方法】

1. マットセンサーを敷き布団の上(シーツの下或いは上)に置いてください。
2. マットセンサーとアラーム本体を専用コードで接続してください。
3. アラーム本体前面上部の黄緑色のつまみを動かして、アラーム音量を設定してください。
 - コードを接続した途端にアラームが鳴る場合はマットセンサーが乾いていない可能性があります。よく乾かしてから使ってください。

＜アラームが鳴ったら＞

4. アラーム本体前面下部の「RESPOND」ボタンを押してください。
 - アラーム音が止まります。
5. アラーム本体に差し込んであるコードを抜いてください。
 - コードを抜かないと、赤ランプは点滅し続け、再びアラームが鳴り始めます。
 - ◇ レベル1、2に設定している場合15分後
 - ◇ レベル3に設定している場合1分後
6. 予備のマットセンサーをお持ちの場合は、予備のマットセンサーを接続し、上記手順1～3に従ってセットしてください。
7. 濡れたマットセンサーは、翌朝洗濯してください。
 - 下記「お手入れの方法」をご参照ください。



音量設定スイッチ
レベル0～3で音量と
音質が変わります。

アラーム本体(表面)


「RESPOND」ボタン

- アラーム時に中の赤ランプが点滅します。
- 押すとアラーム音が止まります。

※ アラーム音が弱くなるか出なくなったら、新しい電池(単三・アルカリ乾電池・2本)に交換してください。

クリップ
シーツなどに止めたりぶらさげたりもできます。


電池
+-の向きに注意してください。

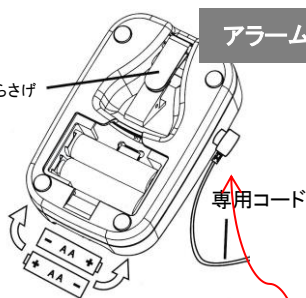

アラーム本体(表面)

円内が尿漏れを感知するエリアです。

端子の脇を持って丁寧に外してください。
コードを持って引っ張らないでください。

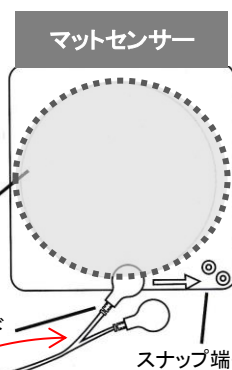

- マットの材質はポリエステル50%綿50%ですが、裏面は防水生地のため、濡れは透過しません。
- マットセンサーのサイズは約86x86cmです。
- 尿濡れを感知するエリアは、マット中心部直径約55cmの円内です。
- 感知エリアが濡れないとアラームは鳴りません。
- 感知エリア内でも、濡れが非常に軽微なときは、アラームが鳴らないことがあります。
- センサーマットが乾いていない状態で接続すると、アラームが鳴ります。乾いてからお使いください。
- 夜尿が無くなっても、1ヶ月は続けて使用してください。

【お手入れの方法】

1. マットセンサーよりコードを外してください。
2. 以下注意事項を必ず守り、洗濯機で洗ってください。

洗濯に関する注意事項

- 洗濯用ネット袋に入れ、水流「ふう」或いは「弱」で洗濯してください。同じネット袋に他の洗濯物を一緒に入れないでください。
- 中性洗剤を使用してください。但し、漂白剤や増白剤を含む洗剤は使用しないでください。
- 漂白剤や増白剤を添加しないでください。
- アイロンはかけないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。
- 手もみ洗いはしないでください。
- 手絞りはしないでください。
- 直射日光を避け、陰干ししてください。
- ストープ、ヘヤードライヤーなどで強制的に乾燥させないでください。



注意

- 5歳以下の幼児には使用しないでください。
- 本体とマットセンサーをつなぐコードが、使用者の人や足に絡まないようご注意ください。
- 専用コードおよび使用済みの電池は、小さな子どもの手に届くところに置かないようご注意ください。
- 使用済み電池は地方自治体の条例や規則に従って適切に処分してください。
- ベッドで使用の場合、アラーム音に驚いて落下しないよう、ベッドの高さを低くするなど配慮してください。
- 室温で、乾燥した所に保管し、アラーム本体は絶対に濡らさないでください。

【価格】

セット品: 11,600円(税込み12,528円)
(マットセンサーを含みます。)

マットセンサー: 4,400円(税込み4,752円)
(予備、洗い替え用)

【保証期間】 アラーム本体: 1年
マットセンサー: 3ヶ月

【耐用期間】 最善の状態を維持するため、使用后4ヶ月を目処に新しいマットセンサーに交換してください。

輸入販売元およびお問い合わせ先:

株式会社MDK
〒663-8006兵庫県西宮市段上町5-12-15
TEL: (0798)71-2950 FAX: (0798)57-0255
www.mdkinc.co.jp info@mdkinc.co.jp
製造者 PottyMD, USA
製造国 中国

作成: 2015年4月1日